

# Adherus<sup>®</sup>

## AutoSpray

### Selante Dural



Video  
Instruções  
Scaneie Aqui

#### Passo 1

Segure o aplicador com o bico apontando para cima, remova e descarte as tampas vermelhas dos hubs do adaptador para frascos.



#### Passo 2

Conecte os frascos para injetáveis de vidro, nos conectores azuis do adaptador. Frasco com tampa verde na haste na seringa verde, frasco com tampa prata para seringa branca.




#### Passo 3

Com os frascos orientados para cima, pressione o conjunto do empurrador da seringa para empurrar o líquido para os frascos. Agite suavemente o dispositivo até o pó se dissolver.



#### Passo 4

Solte o conjunto do empurrador da seringa para permitir que retorne para trás e então pressione uma segunda vez para garantir que ambas soluções estejam homogêneas.

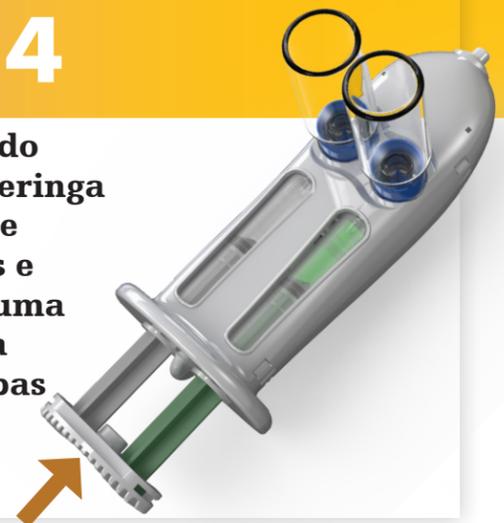

#### Passo 5

Pressione o botão liga / desliga na parte inferior do dispositivo para "ativar" o sistema antes da aplicação do spray de hidrogel.



#### Passo 6

Antes da aplicação, oriente o dispositivo para que os frascos estejam apontando para cima e remova e descarte os dois adaptador de frascos, girando-os, no sentido anti-horário até que os conectores sejam ejetados do dispositivo.



#### Passo 7

Oriente o dispositivo para que o bico de pulverização fique apontado para cima e segure um pedaço de gaze, 5 a 10 cm acima do bico. Aplique pressão firme no centro do conjunto do empurrador de seringa do produto até que comece a pulverizar. Quando o selante verde começar a se formar na gaze, pare de pressionar a seringa.



#### Passo 8

Enquanto aponta para o local do tratamento, segure o dispositivo aproximadamente 2 a 4cm de distância, aplique pressão firme o empurrador de seringa para dispensar a solução.



#### Craniomaxilofacial

Este documento destina-se exclusivamente ao uso de profissionais de saúde. Um cirurgião deve sempre confiar em seu próprio julgamento clínico profissional ao decidir se deve usar um determinado produto ao tratar um paciente em particular. Stryker não fornece aconselhamento médico e recomenda que os cirurgiões sejam treinados no uso de qualquer produto em particular antes de usá-lo em cirurgia. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar um produto Stryker. O cirurgião deve sempre consultar o folheto informativo, a etiqueta do produto e / ou as instruções de uso, incluindo as instruções para limpeza e esterilização (se aplicável), antes de usar qualquer produto Stryker. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados porque a disponibilidade do produto está sujeita às práticas regulatórias e / ou médicas em mercados individuais. Entre em contato com o seu representante Stryker se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos Stryker em sua área. A Stryker Corporation ou suas divisões ou outras entidades afiliadas possuem, usam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Adherus, Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. O Adherus é o único selante dural de hidrogel aprovado pela ANVISA com um aplicador AutoSpray com patente e bomba de ar interna. Consulte as instruções do Adherus AutoSpray Selante Dural (80005430586) para obter mais informações.

Fabricado por:  
HyperBranch Medical  
Technology, Inc., uma subsidiária  
Stryker, localizada em  
Durham, North Carolina USA.

Distributed by:  
Stryker do Brasil Ltda  
Rua Urussu, 300 - 7º andar  
Itaim Bibi | São Paulo - SP  
CEP 04542-051  
+55 11 5189.2500  
CMF-TC-AdherusAutoSpray-PT-06/2020-Ver\_2